

# ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ комплексом AngioCode-322

(описаны подготовка комплекса к работе, процесс установки программы на компьютер, стандартные диагностические процедуры)

Чтобы успешно приступить к использованию диагностического комплекса AngioCode-322, необходимо предпринять следующие четыре шага:

1. скачать приложение AngioCode Professional и самостоятельно установить его на Ваш компьютер (ноутбук). Адрес скачивания дистрибутива программы AngioCode Professional, процесс ее установки на Ваш компьютер подробно описаны в электронном Руководстве пользователя этой программы\* (также см. описание ниже по тексту);
2. запустить программу AngioCode Professional на Вашем компьютере;
3. соединить друг с другом все компоненты аппаратной части комплекса AngioCode-322 и подключить его к сети 220В. В частности, подключить к основному блоку прибора AngioCode-322 два ФПГ-датчика, плечевую манжету нужного размера, блок питания и USB-кабель. Этот процесс подробно описан в руководстве по эксплуатации комплекса AngioCode-322 (см. бумажный паспорт изделия, находящийся в комплекте прибора AngioCode-322), а также в видеоролике (см. ниже по тексту);
4. подключить основной блок AngioCode-322 соединительным USB-кабелем к usb-порту Вашего компьютера (на котором ранее уже запущена программа AngioCode Professional – см. шаг 2 выше) и дождаться момента, когда приложение AngioCode Professional на Вашем компьютере свяжется (установит соединение) с основным блоком AngioCode-322 (возможно, автоматически обновит версию внутренней прошивки основного блока AngioCode-322).

\* - руководство пользователя программы AngioCode Professional представлено исключительно лишь в электронном виде и доступно непосредственно из самой программы AngioCode Professional, предварительно установленной на Ваш компьютер (см. основное меню в самой программе AngioCode Professional по адресу «Справка – Документация – Руководство пользователя (pdf)»). Также Электронное Руководство пользователя программы AngioCode Professional можно скачать:

- с официального промо-сайта [angiocode.ru](http://angiocode.ru) (раздел «Загрузки – AngioCode-322», <https://angiocode.ru/downloads/angiocode-322/>);
- с официального сайта продавца [www.mydozimetr.ru](http://www.mydozimetr.ru) - дистрибьютора этого прибора по ссылке [https://mydozimetr.ru/catalog/poleznoe/angiocode\\_322/](https://mydozimetr.ru/catalog/poleznoe/angiocode_322/) (см. вкладку «Документы»).

После успешного завершения четвертого шага комплекс AngioCode-322 готов к работе.

Теперь можно проводить нужное Вам тестирование. Для этого:

- в приложении AngioCode Professional на Вашем компьютере следует создать карточку нового пациента (т.е. создать новую запись в базе данных пациентов). Алгоритм создания новой записи в БД пациентов в приложении AngioCode Professional подробно описан в электронном Руководстве пользователя программы AngioCode Professional (также см. ниже по тексту);
- расположить на пациенте нужные компоненты комплекса (ФПГ-датчики и/или плечевую манжету) и запустить соответствующий тест (см. также ниже по тексту).

**Правила поведения пациента** до запуска тестирования и в ходе проведения исследования подробно описаны в электронном Руководстве пользователя программы AngioCode Professional - в каждом из видов тестирования (также см. текст ниже).

**Алгоритмы действий специалиста**, а также особенности подготовки пациента к тестированию и правила его поведения во время исследований для каждого вида тестирования подробно расписаны в электронном Руководстве пользователя программы AngioCode Professional (также см. ниже по тексту).

Настоятельно рекомендуем до начала тестирования пояснять пациенту суть проводимой процедуры: последовательность процессов алгоритма измерения, правила поведения пациента до и во время тестирования, а также описать болевые ощущения, которые он будет испытывать во время проведения окклюзионной пробы.

Для самостоятельного знакомства с прибором AngioCode-322 подойдет **обучающий видеоролик по ссылке** <https://www.youtube.com/watch?v=4iGj-NvBchg> или <https://rutube.ru/video/abe80038fc3fa1809d49aad07858f1a8/>

Ниже приведена детализация этого ролика по временным меткам:

02:48 – 03:19 – порядок сборки/подключения всех компонентов комплекса AngioCode-322 между собой;

05:02 – 05:49 – ввод сведений о новом пациенте в базу данных программы AngioCode Professional, установленной на Вашем компьютере\*;

04:17 – 05:01 – правила подготовки пациента к диагностическим процедурам и правила его поведения во время этих процедур;

06:07 – 06:22 – особенности надевания ФПГ-датчика на палец пациента;

06:23 – 07:00, 07:10 – 07:28 – проверка детектируемых био-параметров пациента перед процессом замера;

07:35 – 11:08 – описание проведения процедуры контурного анализа;

11:10 – 14:25 – описание проведения процедуры окклюзионной пробы

14:25 – 17:35 - описание проведения процедуры фармакологической пробы;

17:40 – 18:30 - описание проведения процедуры измерения артериального давления.

07:00 – 07:10 – как пользоваться справочными материалами при работе в программе AngioCode Professional на Вашем компьютере.

\* - последовательность установки программы AngioCode Professional на Ваш компьютер описана ниже.

## Сведения об установке программы AngioCode Professional на компьютер

Актуальную версию приложения AngioCode Professional можно скачать с официального сайта производителя по ссылке: <https://angiocode.ru/downloads/angiocode-322> (чтобы скачать дистрибутив программы AngioCode Professional на Ваш компьютер, нужно найти в таблице на открывшейся веб-странице в графе «Скачать» пиктограмму и нажать на нее указателем мышки).

Также приводим прямую ссылку для скачивания дистрибутива программы AngioCode Professional (для ее последующего сохранения на Вашем компьютере):

<https://angiocode.ru/files/RU/AngioCodeProfessional/SFX/AngioCodeProfessional.exe>

Для работы с приложением AngioCode Professional следует использовать компьютер (или ноутбук), удовлетворяющий следующим минимальным требованиям:

- операционная система Windows XP/7/8/10;
- оперативная память (ОЗУ) не менее 2 ГБ;
- видеокарта с разрешением не хуже 1024x768;
- не менее 800 Мб свободного места на жестком диске;
- наличие USB-порта.

Как правило, этим требованиям соответствуют все современные ноутбуки/компьютеры.

Для удобства можно также подключать принтер (для вывода на бумажный носитель результатов исследований).

Процесс установки приложения AngioCode Professional на Ваш компьютер весьма прост – он начинается с запуска файла AngioCodeProfessional.exe, который Вы предварительно скачали и сохранили на Вашем компьютере. Перед установкой программы AngioCode Professional не нужно подключать основной блок прибора AngioCode-322 к Вашему компьютеру. Далее необходимо следовать простейшим инструкциям, появляющимся в процессе автоматической установки программы на Ваш компьютер. Т.к. эти инструкции интуитивно понятны, мы не приводим их в этом документе. Максимально подробно процесс установки программы AngioCode Professional на компьютер (со скриншотами) Вы можете найти в электронном Руководстве пользователя программы AngioCode Professional.

При возникновении любых вопросов обращайтесь по следующим контактам:

[info@mydozimetr.ru](mailto:info@mydozimetr.ru)

8(800) 333-09-18 (в рабочее время)

+7915-628-2691 (в рабочее время)

с уважением, команда MyDozimetr.ru